

BUBBLES THE FISH II™ PEDIATRIC AEROSOL MASK

FOR USE WITH ALL NEBULIZERS

SOFT PLASTIC, LATEX FREE

FOR SINGLE PATIENT USE (ONE PERSON) ONLY

BUBBLES THE FISH II™ AEROSOL MASK

FIG. 1

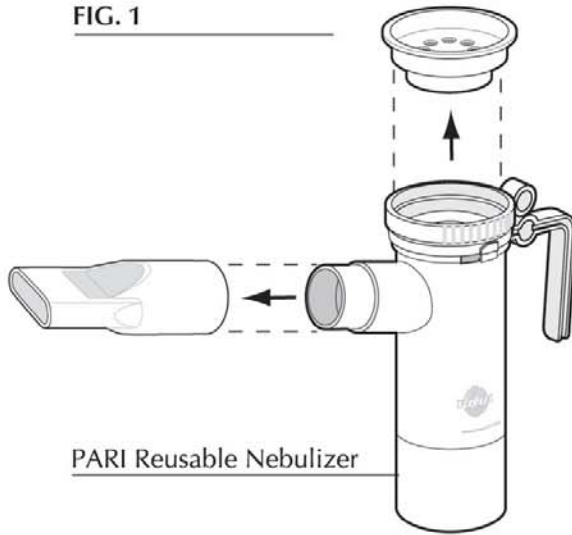


FIG. 2


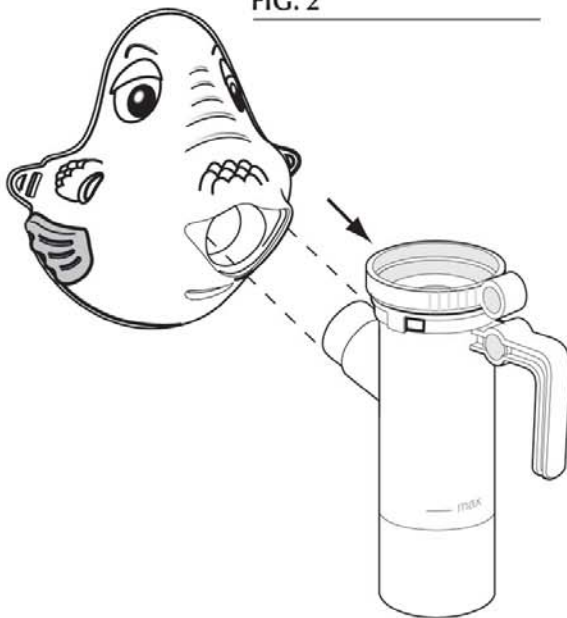


FIG. 3

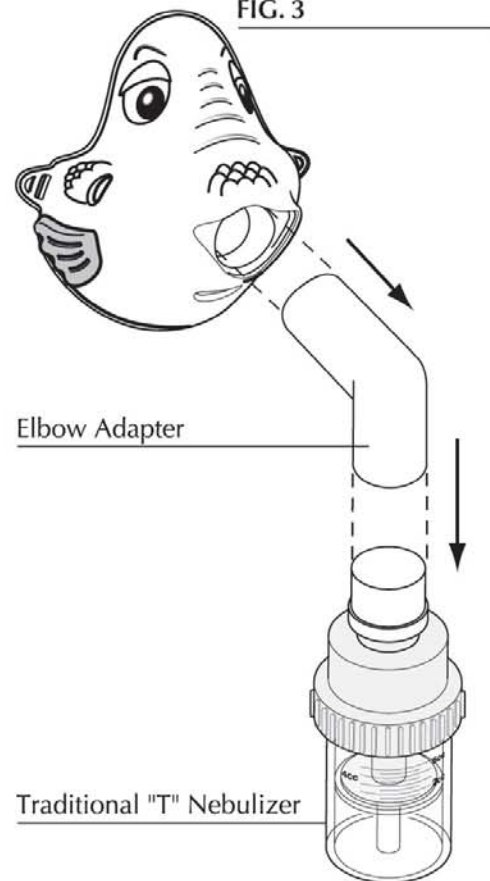

⚠️ WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA:

Read all warnings and instructions before use. Improper use can result in serious or fatal illness or injury.

Leas toda las advertencias e instrucciones antes de usarse. El manejo inapropiado podría resultar en perjuicio del paciente o su enfermedad o hasta llegar a ser fatal.

Lire tous les avertissements et toutes les instructions avant l'emploi. L'usage inapproprié de ce dispositif peut transmettre une maladie ou entraîner une blessure grave ou même mortelle.

ENGLISH

1. When using a PARI Reusable Nebulizer, first remove the inspiratory valve cap from the top of the nebulizer (FIG. 1).
2. Remove the mouthpiece from the nebulizer, if attached (FIG. 1). Press mask firmly onto the nebulizer outlet (FIG. 2). Attach elastic strap through the side holes, if needed. Hand wash and disinfect per your PARI Nebulizer Instructions For Use. **Do Not Autoclave the BUBBLES THE FISH II™ Reusable aerosol mask.**

Alternatively, you can use with traditional "T" piece nebulizers by first attaching elbow adapter to nebulizer, then attach mask to elbow piece (FIG. 3).

FRANÇAIS

1. En utilisant le nébuliseur PARI réutilisable, il faut tout d'abord enlever le bouchon de la soupape d'entrée d'air qui se trouve sur le dessus du nébuliseur (FIG. 1).
2. Retirez l'embout buccal du nébuliseur, le cas échéant (FIG. 1). Appuyez fermement le masque sur la sortie du nébuliseur (FIG. 2). Au besoin, fixez la sangle élastique à l'aide des ouvertures latérales. Nettoyez à la main et désinfectez conformément au Guide d'utilisation de votre nébuliseur de PARI. **Ne traitez pas à l'autoclave le masque pulvérisateur BUBBLES THE FISH II™.**

Comme alternative, vous pouvez l'utiliser avec la pièce en "T" pour nébuliseur, en fixant d'abord le coude adaptateur au nébuliseur, puis en raccordant le masque au coude adaptateur (Fig. 3).

ESPAÑOL

1. Cuando utilice un nebulizador reutilizable, PARI, primero remueva la tapa con la válvula inspiratoria de la parte superior del nebulizador (FIG. 1).
2. Si la boquilla se encuentra conectada al nebulizador, quítela (FIG. 1). Oprima firmemente la máscara a la salida del nebulizador (FIG. 2). Si es necesario, conecte la tira de plástico a través de las aberturas laterales. Lave a mano y desinfecte siguiendo las instrucciones de uso de su nebulizador PARI. **No esterilice en autoclave la máscara aerosol BUBBLES THE FISH II™.**

Por otra parte, la puede usar con nebulizadores con "T", conectando primero el adaptador en ángulo al nebulizador y luego conectando la máscara a la pieza en ángulo (FIG. 3).

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA:

When using a "T" piece nebulizer, the enclosed elbow adapter should be used only with a BUBBLES THE FISH II™ aerosol mask. Do not use with any other masks.

Lorsque vous utilisez la pièce en "T", vous ne devez utiliser le coude adaptateur fourni qu'avec le masque pulvérisateur BUBBLES THE FISH II™. Ne pas utiliser avec tout autre masque.

Cuando se use un nebulizador con "T", El adaptador en ángulo adjunto debe de utilizarse únicamente con la máscara para aerosol BUBBLES THE FISH II™. No lo utilice con ninguna otra máscara.